

ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU



İLGİLİ ÜRÜNLER

Kapalı erkek luer konnektörler

ÜRÜN TANIMI

ONCOERA SAFE İğnesiz Enjektör Adaptörleri, tehlikeli ilaçların güvenle hazırlanması ve taşınması için kullanılan konnektörlerdir. Enjektör adaptörleri, şırınga ve flakon adaptörleri arasında ve ayrıca ilaç uygulama setleri ile iğnesiz konnektörler arasında kapalı bir sistem yaratır.

KULLANMA TALİMATI

1. Enjektör adaptörünün ve luer kilitli şırınganın ambalajları açılır. Enjektör adaptörü luer kilitli şırıngaya çevirerek kilitlenir.
2. Flakonun koruyucu kapağı açılır. Ortaya çıkan mantar tıpa %70 IPA ile silinir.
3. Flakon adaptörünün ambalajı açılır. Spike uç koruma kapağı çıkarılır. Flakon adaptörünün spike ucu flakonun mantar tıpasına tek hamlede ve dik bir açı ile batırılır.
4. Enjektör adaptörü, flakon adaptörünün iğnesiz konnektörüne çevirerek kilitlenir.
5. Şırınga yere 90 derecelik bir açıyla tutularak şırınga pistonu geri doğru çekilir ve gerekli miktar ilaç şırıngaya alınır.
6. Transfer setin üzerinde bulunan iğnesiz konnektörün koruyucu kapağı açılır ve içinde ilaç bulunan şırınganın enjektör adaptörü transfer setin iğnesiz konnektörüne kilitlenir.

7. Şırınga pistonu itilerek şırınga içindeki ilaç torba içine gönderilir. İlaç gönderimi tamamlandıktan sonra, şırınga içine az miktarda sıvı çekilir ve tekrar torbaya gönderilir. (YIKAMA)

UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Ambalaj açılmışsa veya yırtıkta KULLANMAYINIZ.
3. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
4. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
5. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
6. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
7. Valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, ürünü değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir
8. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
9. Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
10. Ürünün yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
12. Bir ilacın veya sıvının ürüne hasar verdiğini gözlemlerseniz, ürünü yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.
13. İlaç hazırlama işlemi bittiğinde flakon adaptörünü flakondan ve enjektör adaptörünü şırıngadan ayırmadan bütün olarak imha ediniz.
14. Tehlikeli ilaçların imhasına yönelik yerel düzenlemeleri dikkate alınız.

ENJEKTÖR ADAPTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı
Bilgileri



Onaylanmış
Kuruluş
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma
Tarihi



Lot
Numarası



Referans
Numarası



EO Gazı ile
Steril
edilmiştir



Tekrar Steril
Edilmez




Ambalajı
Hasar
Görmüşse
Kullanmayınız



Güneşten
Uzak
Tutunuz



Kullanım
Kılavuzuna
Bakınız

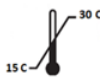

Saklama
Sıcaklığı
Limitleri



Tek
Kullanımlıdır



Dikkat



Pirojen
İçermez



DEHP
İçermez



Lateks
İçermez



Tıbbi Cihaz